



オペレーションマニュアル

動画管理 編

目次

はじめに.....	1
1. 動画を取り込む.....	2
2. 動画を再生する.....	5
3. 二つの動画を並べて再生する.....	7
4. 動画の情報を修正する.....	8
5. 一覧から動画を削除する.....	9
6. 外部ビューアによる表示.....	10
6.1 外部ビューアの登録.....	10
6.2 外部ビューアの起動.....	12
6.3 外部ビューア登録情報の修正.....	14
6.4 登録した外部ビューアを一覧から削除する.....	15

はじめに

本マニュアルは、動画管理に関するオペレーションの説明です。

☆わかりにくい用語の解説☆

- クリック: マウスの左クリック、もしくはマウスの右ボタンを1回押してすぐに離す操作。
- 右クリック: マウスの右ボタンを1回押してすぐに離す操作。
- 左クリック: マウスの左ボタンを1回押してすぐに離す操作。
- ダブルクリック: マウスの左ボタンを素早く押して離し(クリック)、間を空けずにその場所で同じ動作をもう1回繰り返す操作。
- ドラッグ: マウスの左ボタンで選択したまま、マウスを動かす操作。
- ドロップ: 移動先でマウスボタンを離す操作。
- サムネイル画像: 多数の画像を一覧表示するために縮小された画像。本来は「親指(thumb)の爪(nail)」という意味。


1. 動画を取り込む

診察画面の「動画」アイコンを押してください。




2

動画管理画面が表示されますので、「動画の新規登録」アイコンを押してください。

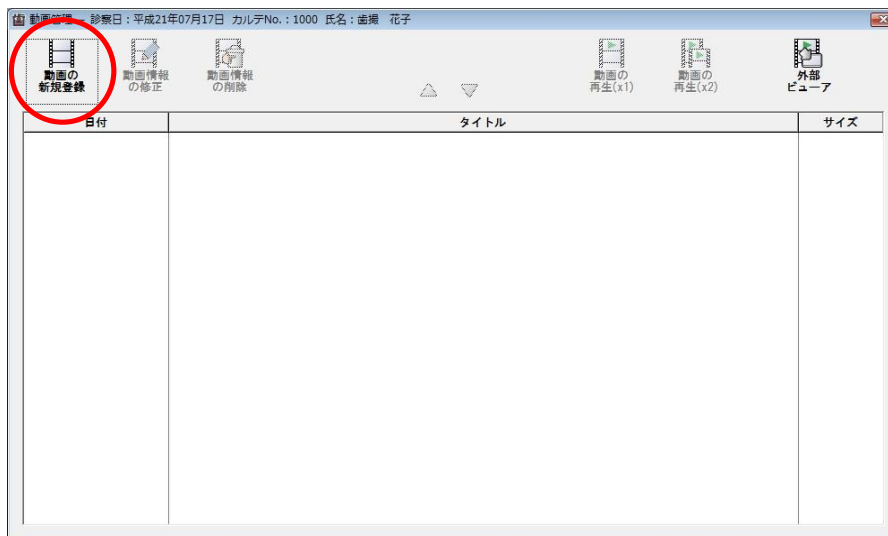

3

取り込む動画を選択後、「開く(O)」ボタンを押してください。

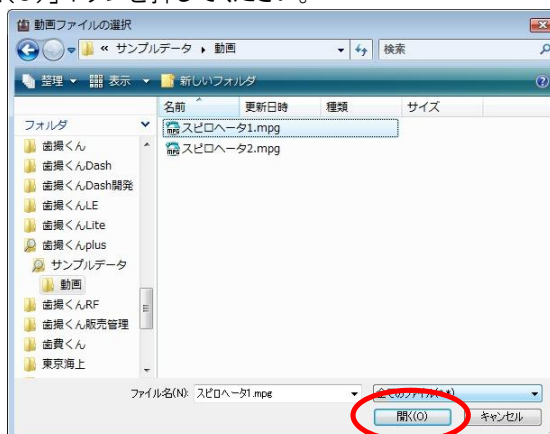

4


動画の新規登録画面が表示されます。




5

キーボード、またはマウス操作で日付の入力を行うことができます。

▼ ボタンを押すと、カレンダー入力画面から日付が入力できます。

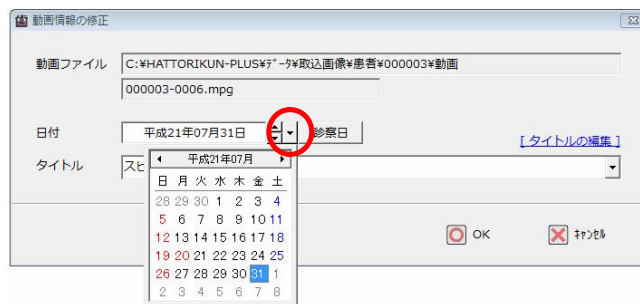


または「診察日」ボタンで、患者情報に登録されている診察日の中から、日付を入力することができます。

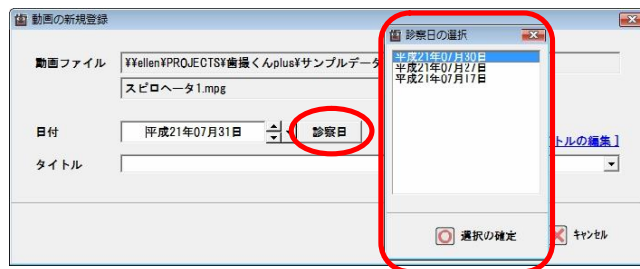

※日付の詳しい入力方法は、「[歯撮くんplusオペレーションマニュアル 基本入力編](#)」の「1. 日付の入力方法」の章をご覧ください。


6

タイトルを編集します。タイトル入力エリアにキーボードで直接入力するか、[タイトルの編集] ボタンを押してください。

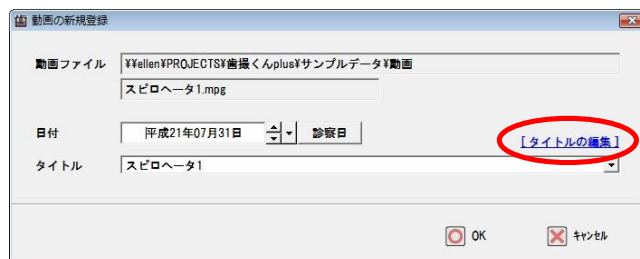


[タイトルの編集] ボタンを押すとタイトルの編集画面が表示されますので、画面上部の入力エリアに直接キー入

カした後、「追加」アイコンを押し、リストにタイトルを登録してください。

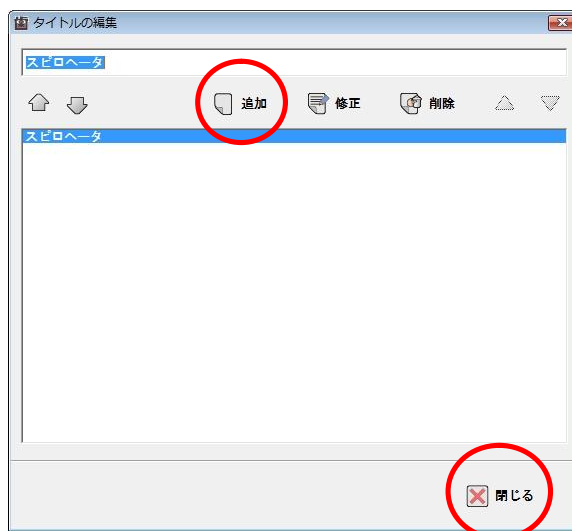

タイトルの編集画面を終了するには、「閉じる」アイコンを押してください。


または、タイトル入力画面の右側にある▼ボタンを押すと、登録したタイトル一覧が表示されますので、その一覧から選択することもできます。

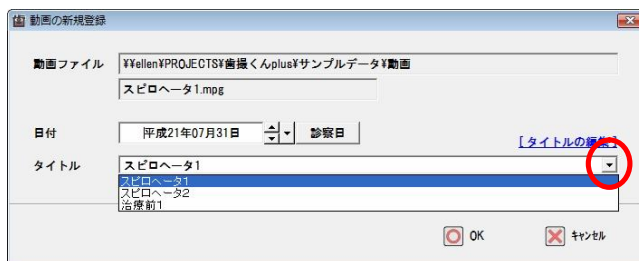

※タイトルの編集画面の詳細な使用法は、「歯撮くんplusオペレーションマニュアル 基本入力編」の「5. タイトルの入力」の章をご覧ください。


7

動画情報の入力が完了したら、「OK」アイコンを押してください。

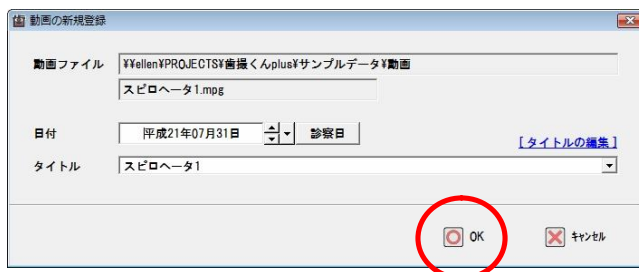




8

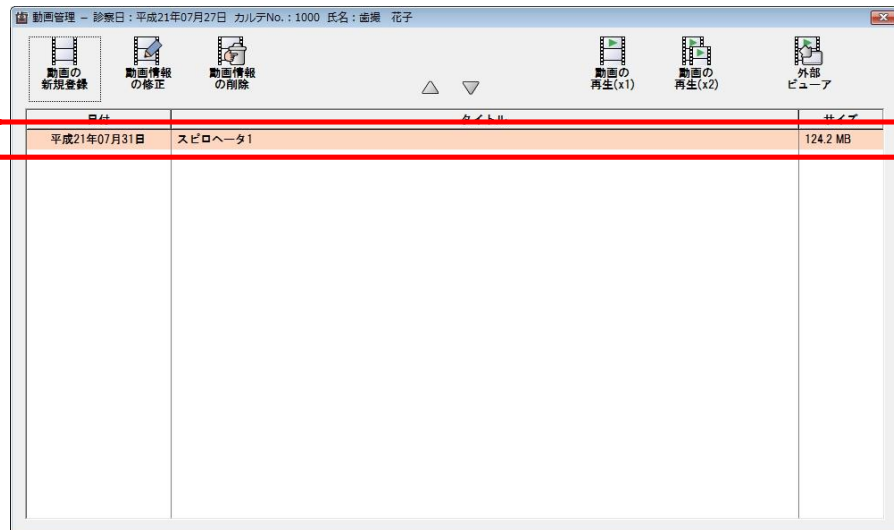動画が取り込まれました。



9


登録されている動画リストの表示順位を変更したい場合は、  アイコンを押して移動させてください。

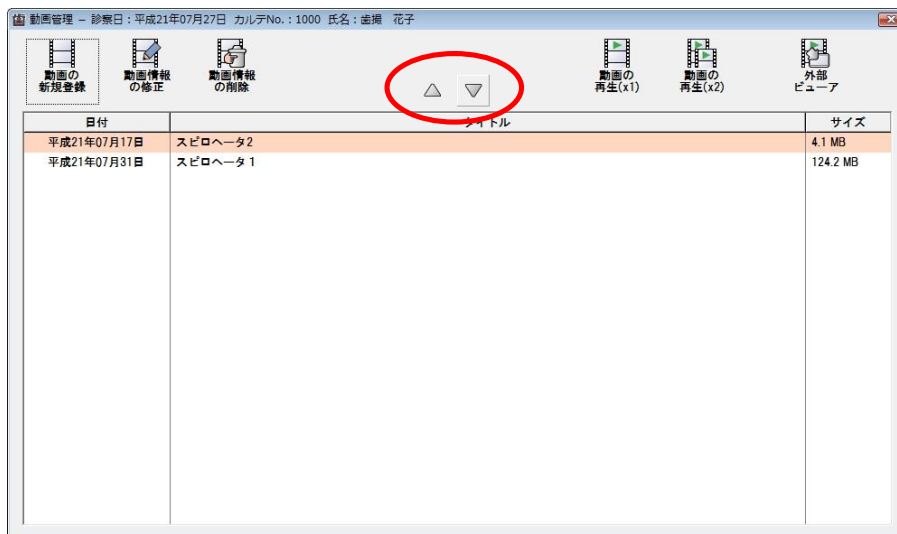

2. 動画を再生する

1

動画管理画面にて、表示する動画を選択した後、「動画の再生(×1)」アイコンを押してください。

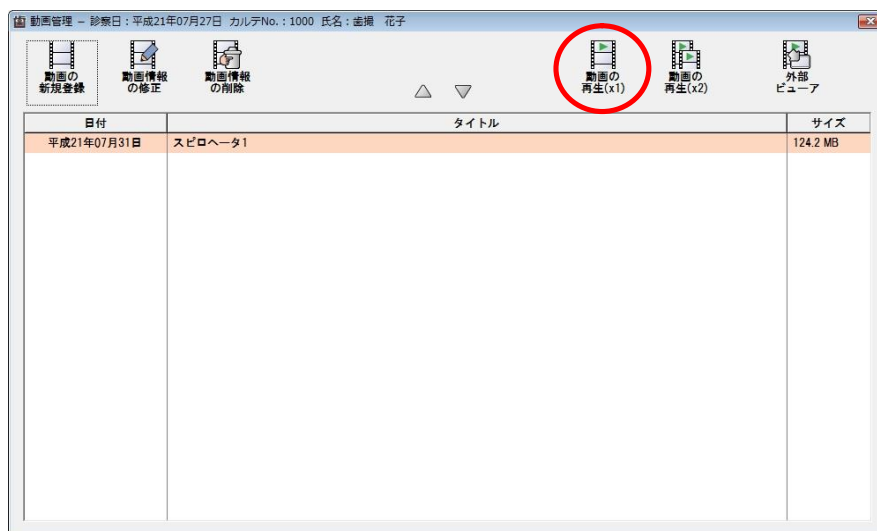

2

動画が再生されました。




- ① 再生・一時停止
- ② 停止
- ③ 音量調節
- ④ 動画情報
- ⑤ リpeat機能(チェックをいれると、繰り返し再生されます。)
- ⑥ 再生位置(クリックした位置まで、動画が進みます)

3. 二つの動画を並べて再生する


1

動画管理画面にて、Ctrlキーを押しながら、動画を二つ選択します。または、Shift キーで連続した項目を選択することもできます。

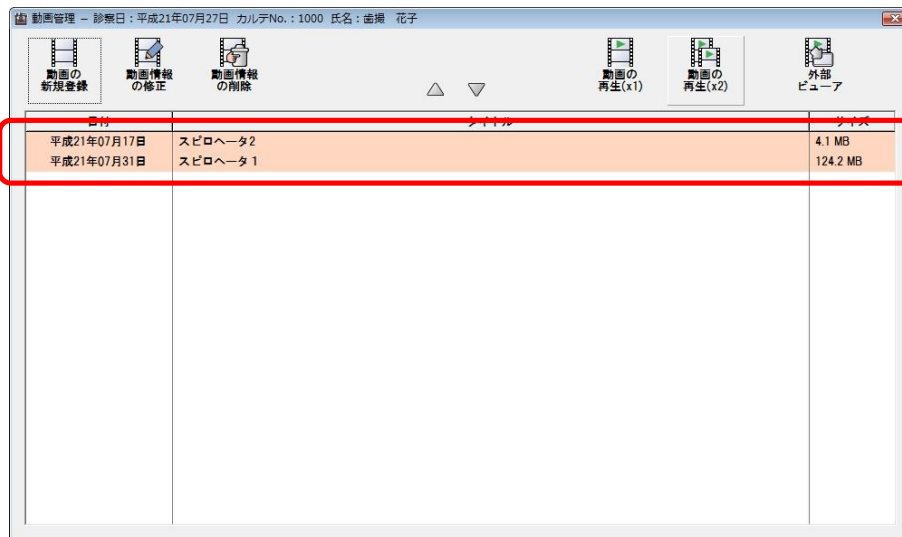


2

選択後、画面の右上にある「動画の再生(×2)」アイコンを押してください。

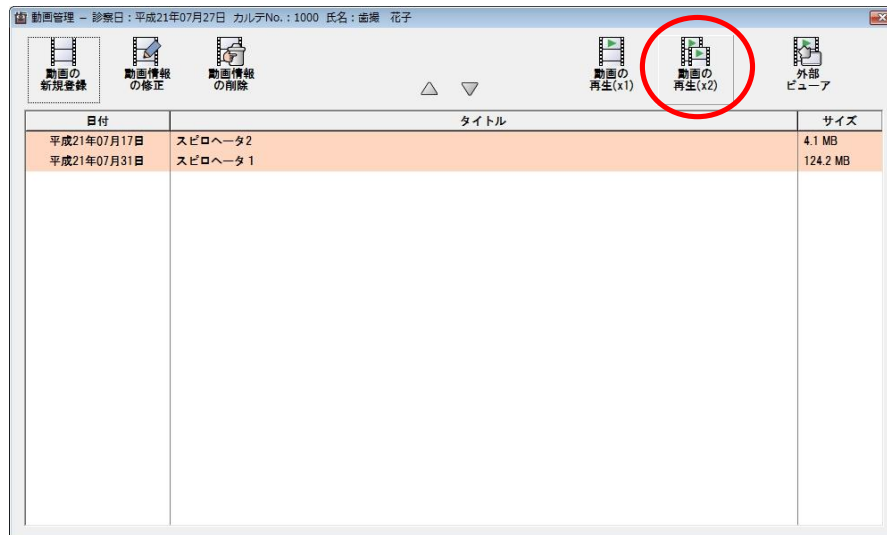

3


二つの動画が同時に再生されます。

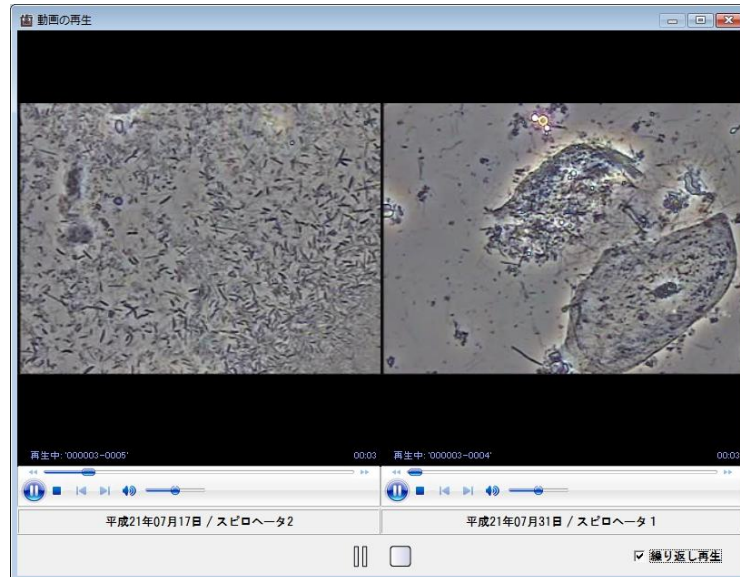

4. 動画の情報を修正する


1

情報を修正する動画を選択した後、画面の左上にある「動画情報の修正」アイコンを押してください。

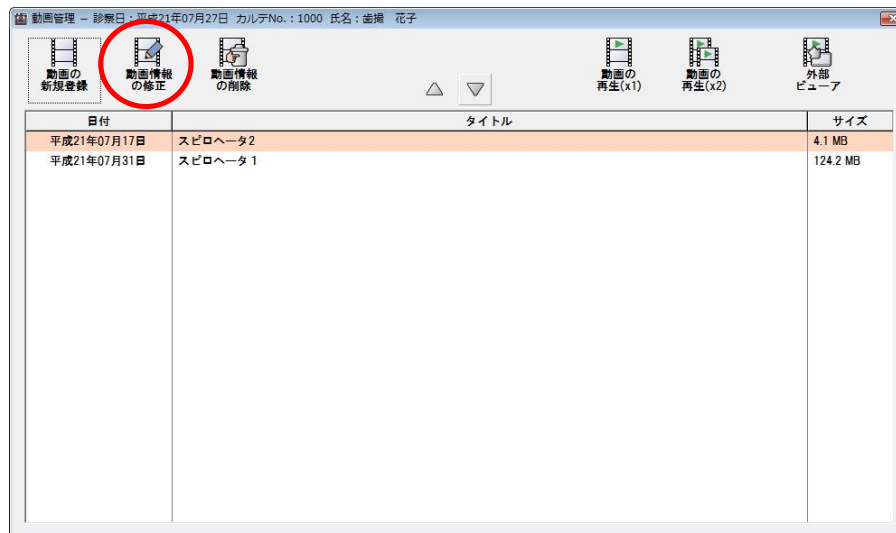


2

情報を修正し、「OK」アイコンを押してください。

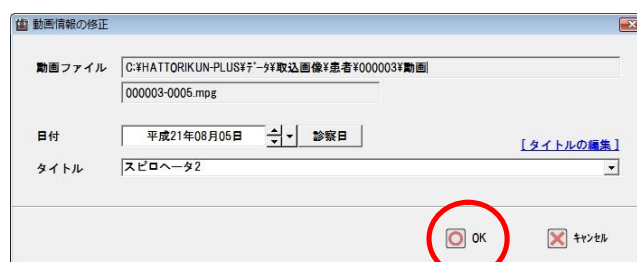

3


動画情報が修正されました。

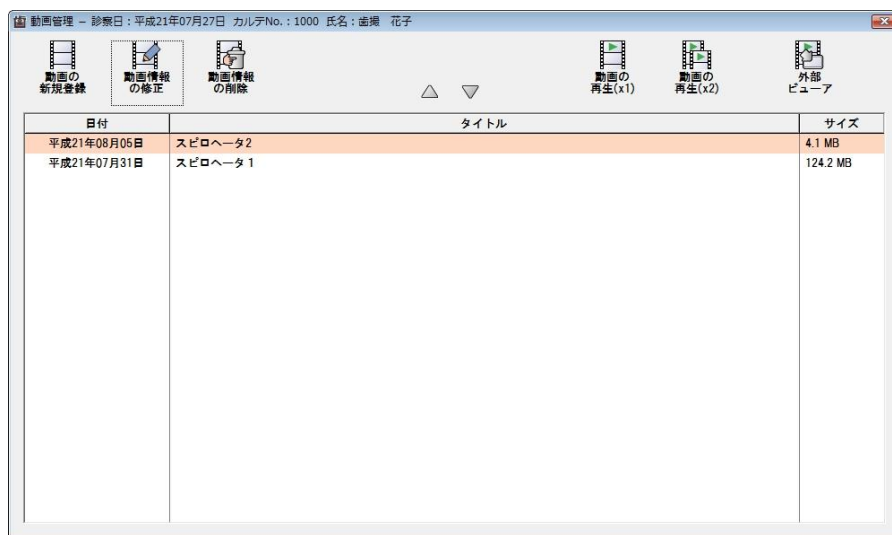

5. 一覧から動画を削除する

1

動画一覧から削除したい動画選択した後、画面の左上にある「動画情報の削除」アイコンを押してください。

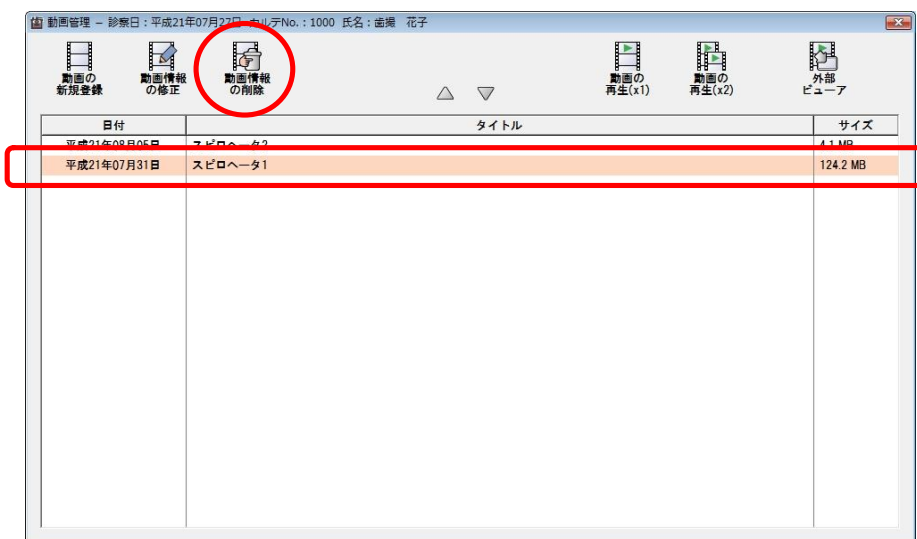


2

削除の確認画面が表示されるので、削除しても良い場合は「OK」ボタンを押します。




3

「OK」ボタンを押します。

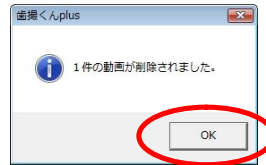

4

一覧から、動画が削除されました。

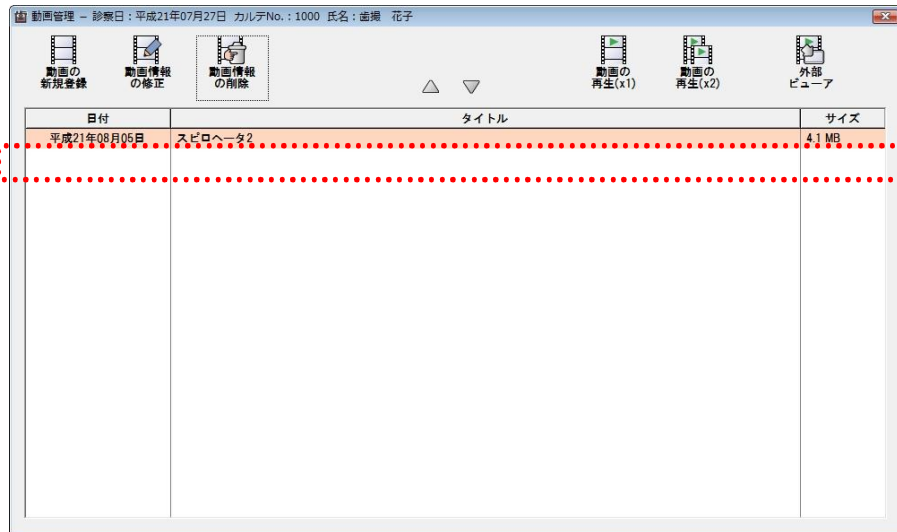


6. 外部ビューアによる表示

※歯撮くんplusでは、WindowsMediaPlayer以外の外部アプリケーションを直接呼び出して、動画を表示することができます。本章では、その方法を「GOM プレイヤー」(フリーソフト)を例として説明いたします。

6.1 外部ビューアの登録


1

動画管理画面右上にある「外部ビューア」アイコンを押してください。

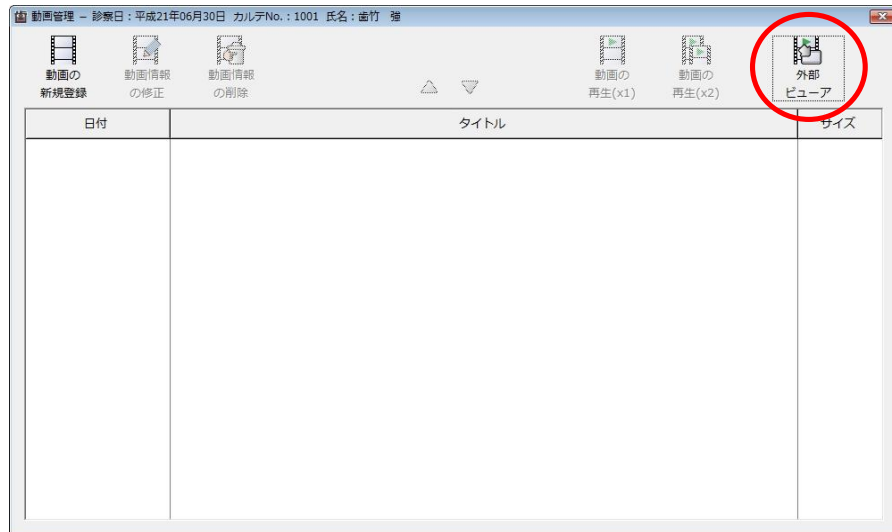


2

画面左上にある「追加」アイコンを押してください。

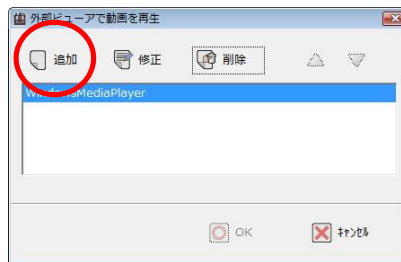


3

外部ビューアを指定するために、右側の「選択」ボタンを押してください。

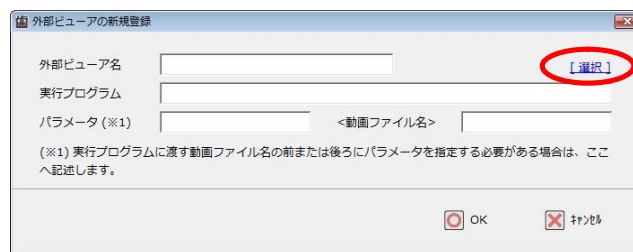

4

GOMプレイヤーは、SETUP版にてインストールした場合、特に変更しなければ「C:\Program Files\GRETECH\GomPlayer」フォルダに「GOM.exe」という実行モジュールがありますので、マウスで選択し、「開く(O)」ボタンを押してください。

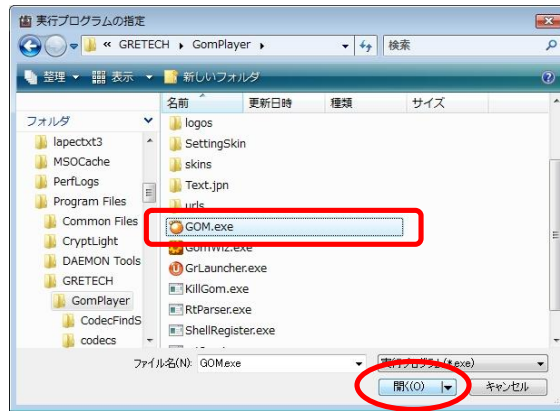


5

外部ビューア名を入力エリアにキーボードで直接入力し、「OK」アイコンを押してください。ここでは「GOM プレイヤー」と入力します。



6


外部ビューアとしてGOMプレイヤーが登録されました。

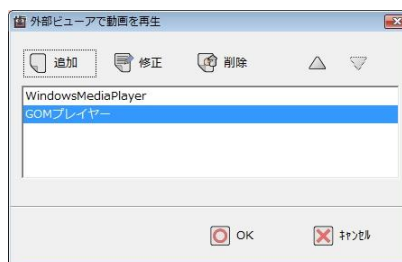

6.2 外部ビューアの起動


1

表示する動画を選択した後、動画管理画面右上にある「外部ビューア」アイコンを押してください。

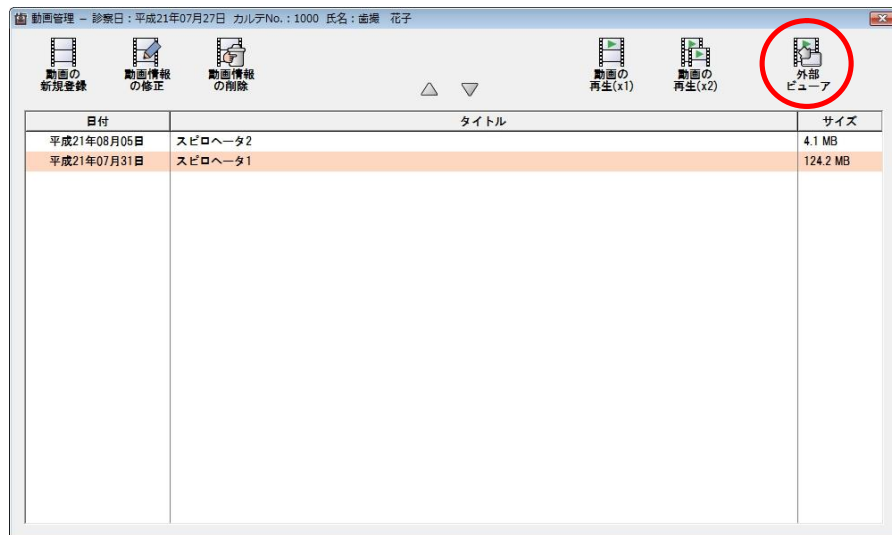

2

使用する外部ビューア(ここでは、「GOMプレイヤー」)を選択し、「OK」アイコンを押してください。

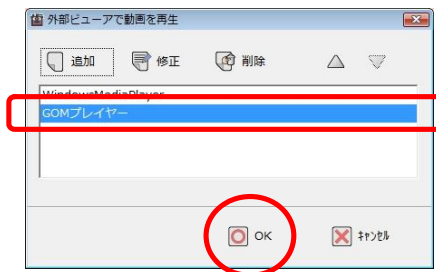


3

GOMプレイヤーで動画が再生されました。



4

GOMプレイヤーを閉じるときは、画面右上にある  ボタンを押してください。




GOMプレイヤーの詳細な機能につきましては、作者のホームページ等をご参照の上、ご使用ください。

※作者URL <http://www.gomplayer.jp/>

6.3 外部ビューア登録情報の修正


1

外部ビューア選択画面上で、情報を修正する外部ビューアを選択した後、「修正」アイコンを押してください。

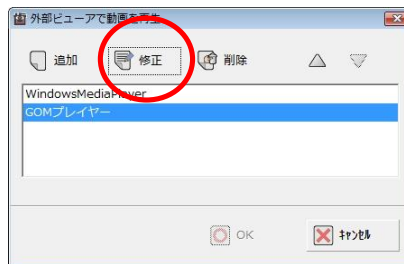


2

情報を修正した後、「OK」アイコンを押してください。

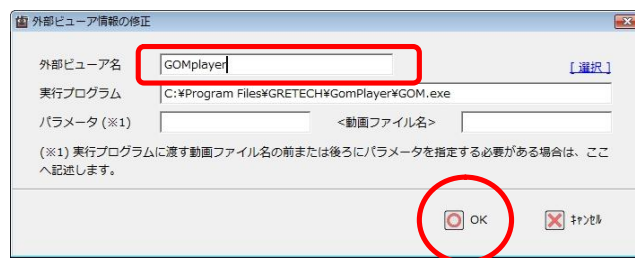

3


外部ビューアの情報が修正されました。

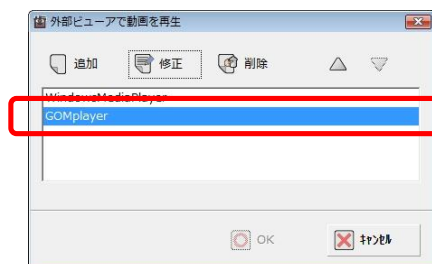

6.4 登録した外部ビューアを一覧から削除する


1

外部ビューア選択画面にて、一覧から削除したい外部ビューアを選択した後「削除」アイコンを押してください。

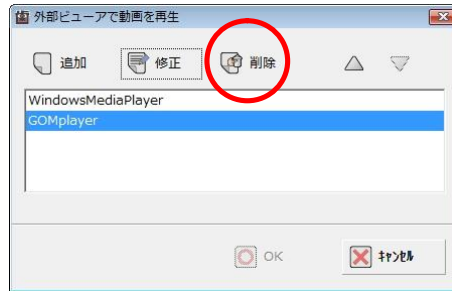

2

削除の確認画面が表示されるので、「OK」ボタンを押します。

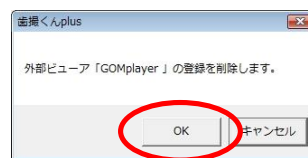

3

一覧から、登録された外部ビューアが削除されました。

