

# オペレーションマニュアル

## 症例 編

# 目次

---

はじめに .....	1
<b>1. 症例の管理 .....</b>	<b>2</b>
1.1 症例管理画面の表示 .....	2
1.2 症例フォルダの追加 .....	2
1.3 症例フォルダの名称変更 .....	3
1.4 症例フォルダの削除 .....	3
1.5 症例画像をファイルから取り込む .....	4
1.6 症例画像をスキャナから取り込む .....	6
1.7 症例画像を取込画像から登録 .....	7
1.8 症例の修正 .....	9
1.9 症例の移動 .....	10
1.10 症例の削除 .....	11
1.11 症例の検索 .....	13
1.12 症例を表示リストに追加 .....	14

# はじめに

本マニュアルは、「歯撮くんplus」症例機能に関するオペレーションの説明です。

画像表示に至るまでの操作は、「画像表示編」を参考に行ってください。

また、HTML そのものに関する説明につきましては、割愛させていただきます。

## ☆わかりにくい用語の解説☆

○クリック: マウスの左クリックのマウスの右ボタンを1回押してすぐに離す操作。

○右クリック: マウスの右ボタンを1回押してすぐに離す操作。

○左クリック: マウスの左ボタンを1回押してすぐに離す操作。

○ドラッグ: マウスの左ボタンで選択したまま、マウスを動かす操作。

○ドロップ: 移動先でマウスボタンを離す操作。

○サムネイル画像: 多数の画像を一覧表示するために縮小された画像。  
本来は「親指(thumb)の爪(nail)」という意味。


# 1. 症例の管理

症例画像は、症例フォルダを階層状に作成することにより管理します。

## 1.1 症例管理画面の表示


1

歯撮くんメニューで「症例」アイコンを押してください。

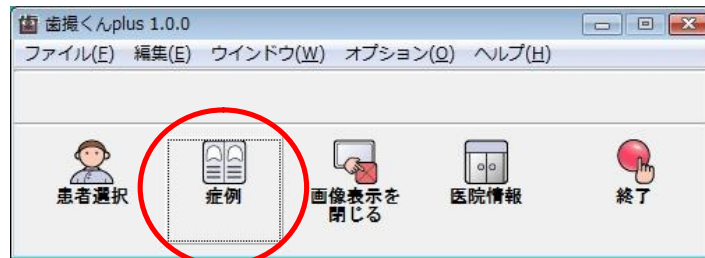

2


症例管理画面が表示されました。

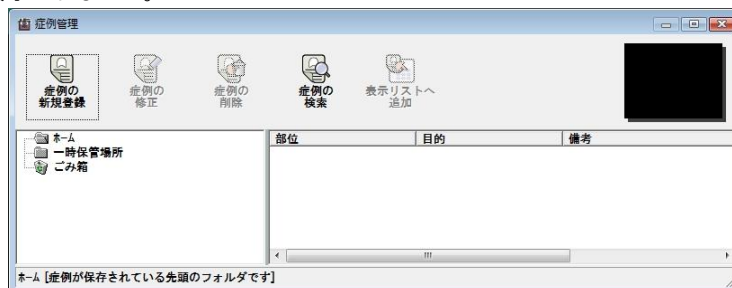

## 1.2 症例フォルダの追加

1

症例管理画面で、新規作成するフォルダの親となるフォルダを右クリックし、表示されたポップアップメニューから、「新しいフォルダをこの下に作成(C)」を選択してください。

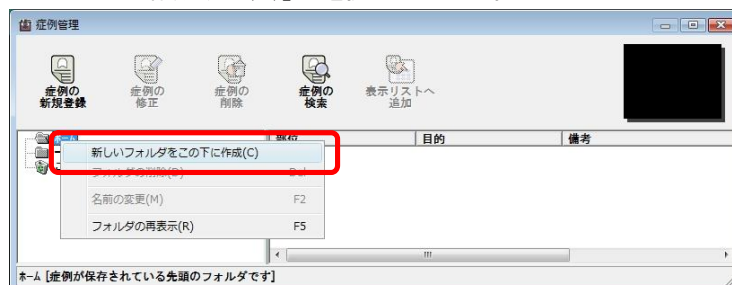

2

選択したフォルダの下に「新しいフォルダ」が作成されました。



※既に新しいフォルダが存在する場合には、「新しいフォルダ(2)」が作成されます。

## 1.3 症例フォルダの名称変更 1


症例管理画面で、変更の対象となるフォルダを右クリックし、表示されたポップアップメニューから「名前の変更(M)」を選択してください。



## 2

フォルダ名をキー入力に変更し、Enter キーを押して確定してください。

(例: 症例フォルダ名を「新しいフォルダ」から「学会発表用」に変更しています。)

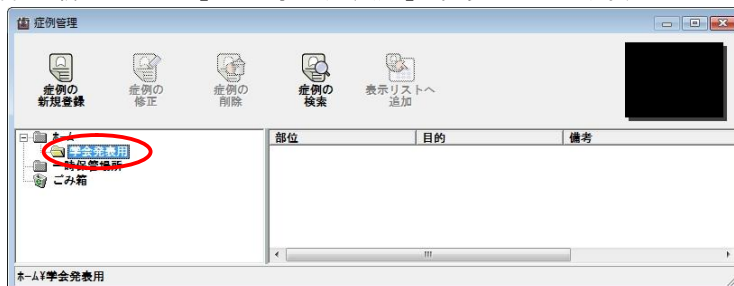

※同一のフォルダ名には変更できません。

## 1.4 症例フォルダの削除 1

症例管理画面で、削除の対象となるフォルダを右クリックし、表示されたポップアップメニューから「フォルダの削除(D)」を選択してください。




2

「OK」ボタンを押してください。



3

「学会発表用」フォルダが削除されました。

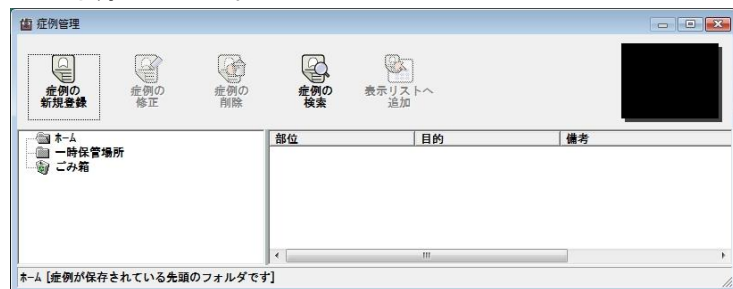

## 1.5 症例画像をファイルから取り込む


1

登録対象となる症例フォルダを選択した後、症例管理画面の「症例の新規登録」アイコンを押してください。




2

症例画像の選択画面の「ファイルから取込」アイコンを押してください。

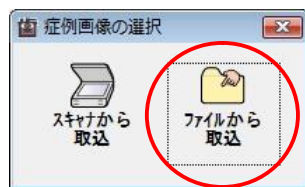

### 3

画像ファイルの指定画面で、対象となるファイルを選択して「開く(O)」ボタンを押してください。

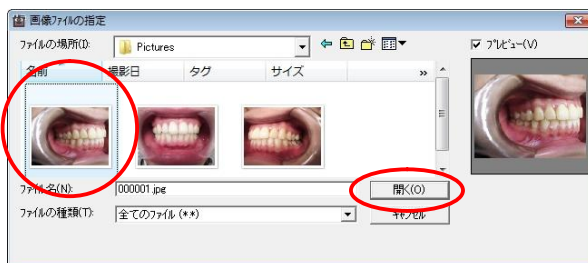

### 4

症例の登録画面から症例情報(部位、目的、備考)の入力を行い、「OK」アイコンを押してください。



※部位・目的・備考、それぞれの詳しい入力方法は「歯撮くんplusオペレーションマニュアル 基本入力編」の「2～4. 部位(目的)(備考)の入力」の章をご覧ください。


### 5

新規登録確認メッセージが表示されますので、登録しても良い場合は「はい(Y)」ボタンを押します。




### 6

「OK」ボタンを押してください。

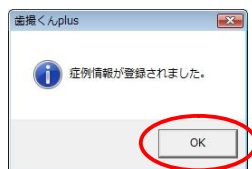

## 7


症例一覧に症例が登録されました。

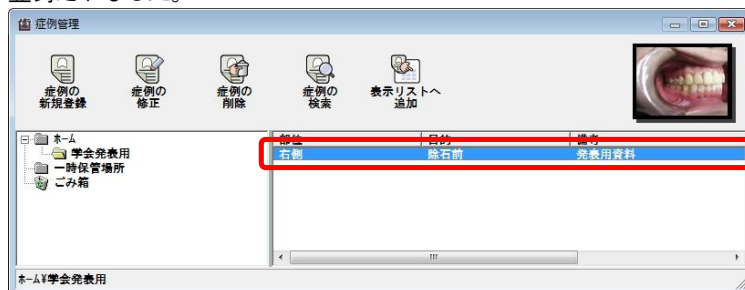

## 1.6 症例画像をスキャナから取り込む


### 1

登録対象となる症例フォルダを選択した後、「症例の新規登録」アイコンを押してください。

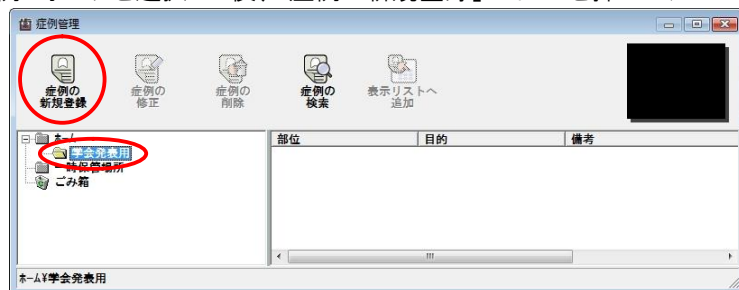

### 2

症例画像の選択画面で「スキャナから取込」アイコンを押してください。

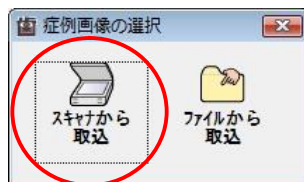

### 3

スキャナの取込画面から画像の取り込みを行ってください。

※スキャナの取込画面は各メーカーによって異なります。詳しくは、スキャナに付属のマニュアルを参照してください。

### 4




症例の登録画面から症例情報(部位、目的、備考)の入力を行い、「OK」アイコンを押してください。



※部位・目的・備考、それぞれの詳しい入力方法は「歯撮くんplusオペレーションマニュアル 基本入力編」の「2～4. 部位(目的)(備考)の入力」の章をご覧ください。

## 5


症例一覧に症例が登録されました。

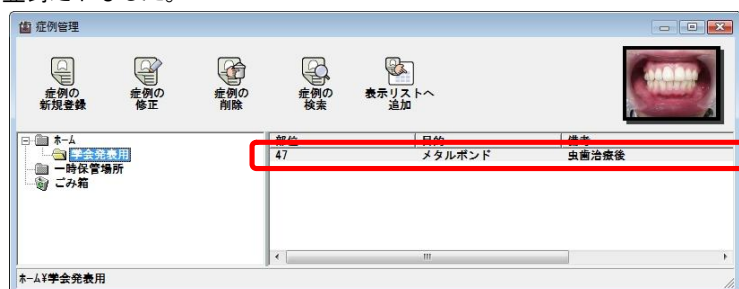

## 1.7 症例画像を取込画像から登録

### 1

画像表示画面で症例となる画像を選択し、マウスで右クリックし、表示されたポップアップメニューから「選択されている画像を症例として登録(C)」を選択してください。

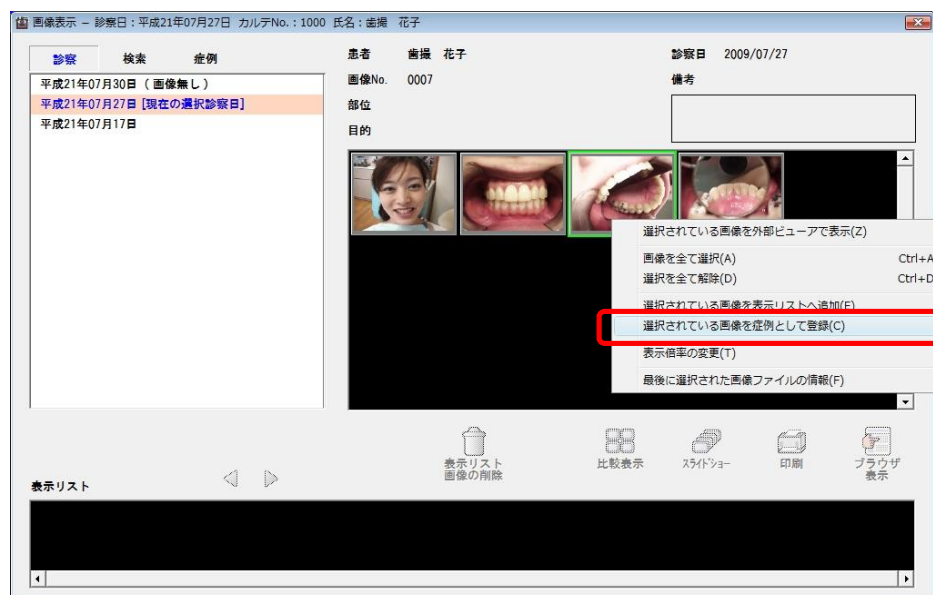

## 2


症例の新規登録画面から症例情報(部位、目的、備考)の入力を行い、「OK」アイコンを押してください。



※部位・目的・備考、それぞれの詳しい入力方法は「歯撮くんplusオペレーションマニュアル 基本入力編」の「2～4. 部位(目的)(備考)の入力」の章をご覧ください。

## 3

新規登録確認メッセージが表示されますので、登録しても良い場合は「はい(Y)」ボタンを押します。

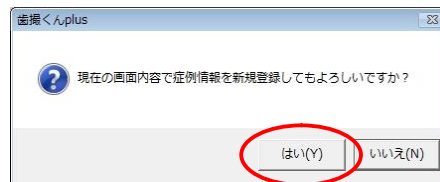

## 4

「OK」ボタンを押してください。



## 5

症例一覧の一時保管場所フォルダに症例として登録されました。




※一時保管場所フォルダからの移動は「1. 9 症例の移動」の章を参照してください。

## 1.8 症例の修正

### 1

症例管理画面の症例一覧で変更したい症例を選択し、「症例の修正」アイコンを押してください。

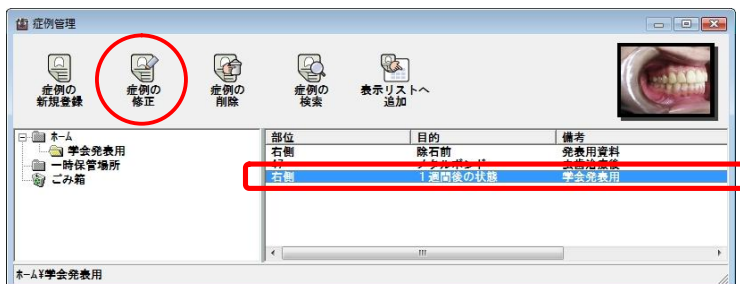

### 2

症例の修正画面が表示されますので、症例情報(部位、目的、備考)を修正してください。



※部位・目的・備考、それぞれの詳しい入力方法は「歯撮くんオペレーションマニュアル 基本入力編」の「2～4. 部位(目的)(備考)の入力」の章をご覧ください。

### 3


症例情報の修正が完了したら、OK アイコンを押してください。

(例: 部位を「右側」から「47」に変更しています。)




### 4

更新確認メッセージが表示されますので、更新しても良い場合「はい(Y)」ボタンを押します。

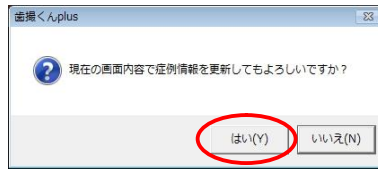

## 5

「OK」ボタンを押してください。

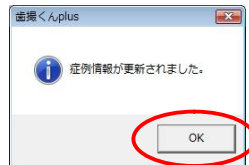

## 6

症例一覧内の症例情報が変更されました。




## 1.9 症例の移動

すでにフォルダに入っている症例を、別のフォルダに移動する方法を以下で説明します。

(以下の説明では、「一時保管場所」フォルダに入っている症例を、「むし歯」フォルダに移動させています。)


### 1

症例管理画面のフォルダ一覧で対象となるフォルダを選択し、症例一覧より対象となる症例の選択を行ってください。

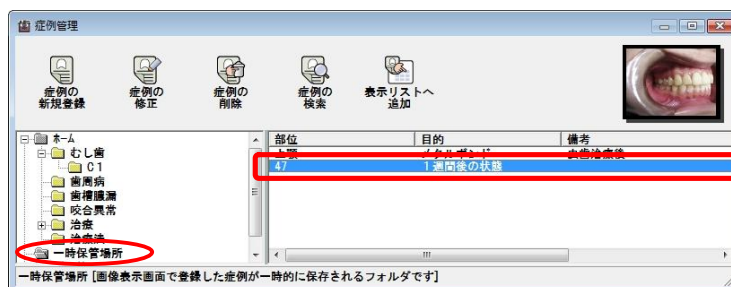

### 2


症例一覧内の症例をマウスの左ボタンでドラッグして、移動させたいフォルダ上でドロップしてください。

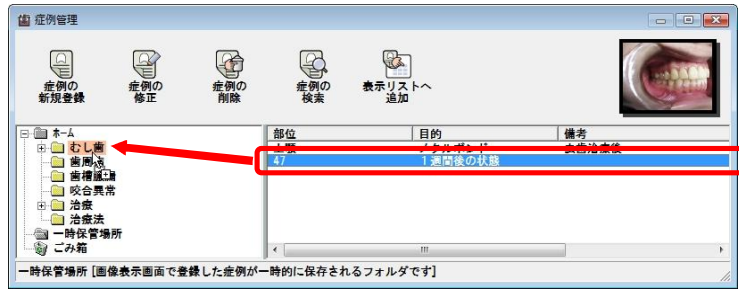

※同一フォルダへの移動はできません。


### 3

「OK」ボタンを押してください。

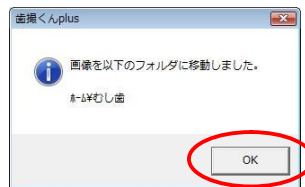


### 4

登録されている症例の移動が完了しました。

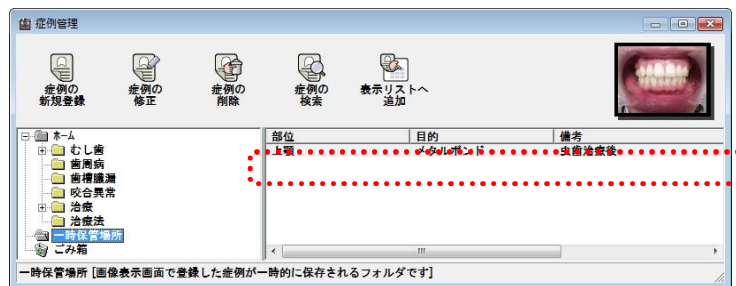

### 5


フォルダ一覧の「むし歯」フォルダを選択すると、「むし歯」フォルダに症例が移動されたことが確認できます。

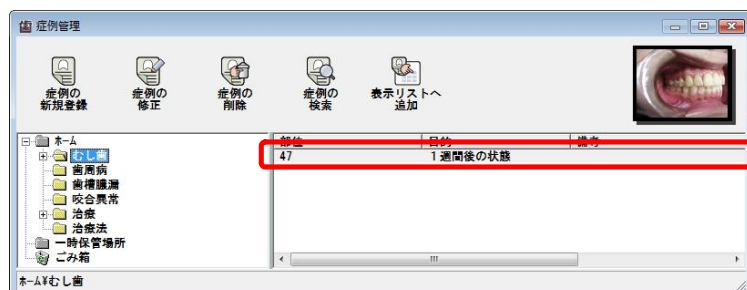

## 1.10 症例の削除


### 1

症例管理画面の症例一覧で削除したい症例を選択し、「症例の削除」アイコンを押してください。

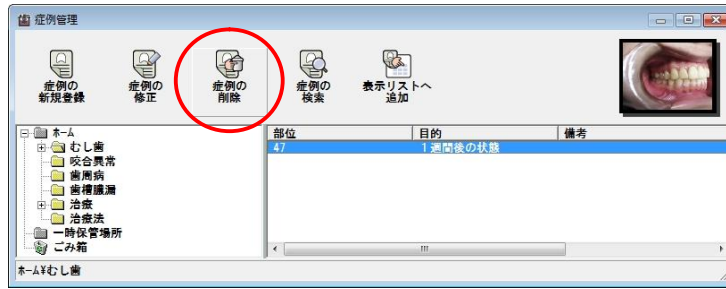


## 2

「OK」ボタンを押してください。

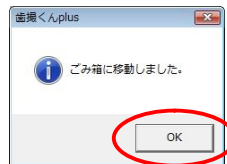

## 3

登録されていた症例が症例一覧から削除されました。

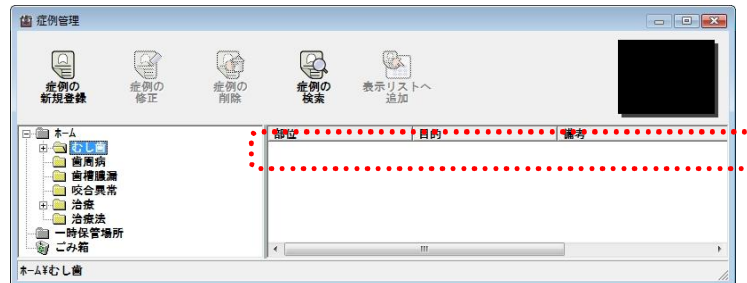


※通常のフォルダ内で削除を行った場合は、症例が「ごみ箱」に移動されます。

## 4


症例を歯撮くんplus内から完全に削除する場合は、「ごみ箱」内の症例を選択し、「症例の削除」アイコンを押してください。

※「ごみ箱」内で削除した症例は、元に戻すことはできません。

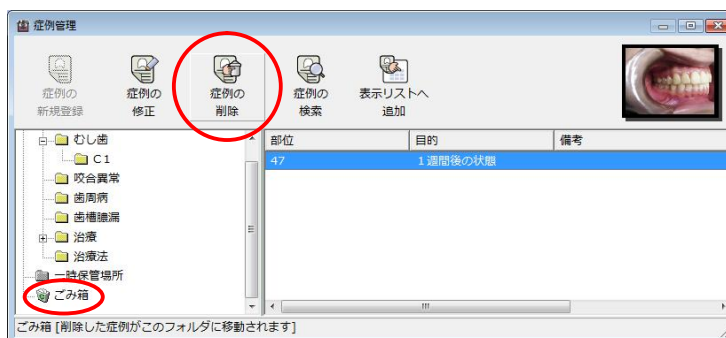


## 5

確認画面が表示されるので、完全に削除しても良い場合は、「はい(Y)」ボタンを押します。

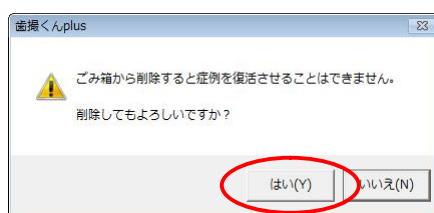


## 6

「OK」ボタンを押してください。

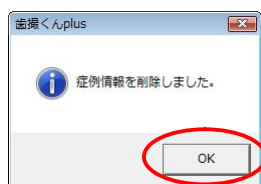

## 7


症例が完全に削除されました。

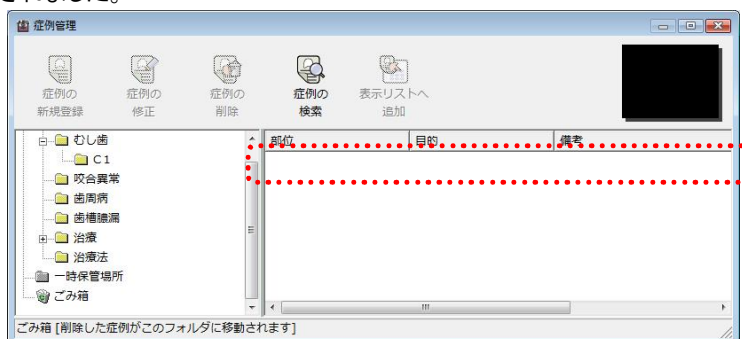

## 1.11 症例の検索

### 1


症例管理画面の「症例の検索」アイコンを押してください。

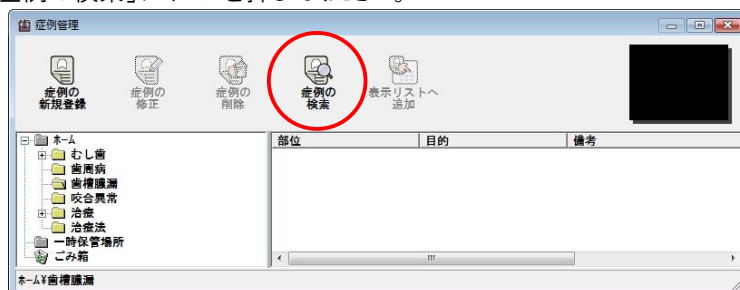

### 2

検索したい部位、目的、備考に検索する文字をキーボードから入力するか、各項目の右側にある[選択]ボタンを押して選択入力し、「検索の実行」アイコンを押してください。


(例:備考に「上顎」を含んだ症例を検索しています。)

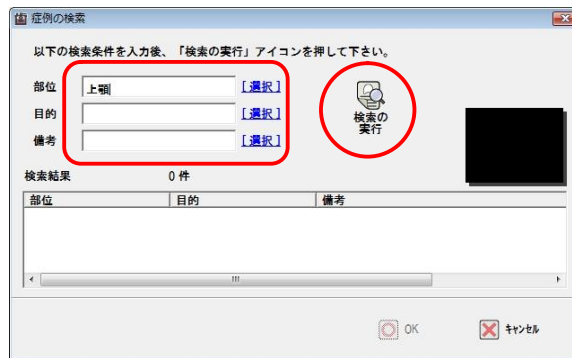

※部位・目的・備考、それぞれの詳しい入力方法は「歯撮くんplusオペレーションマニュアル 基本入力編」の「2～4. 部位(目的)(備考)の入力」の章をご覧ください。


### 3

「検索結果」に該当する症例が表示されます。対象となる症例を選択し「OK」アイコンを押してください。

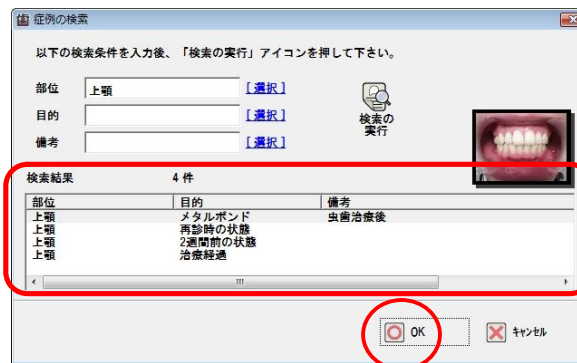

### 4

上記で選択した症例を含むフォルダ内が、一覧に表示されました。

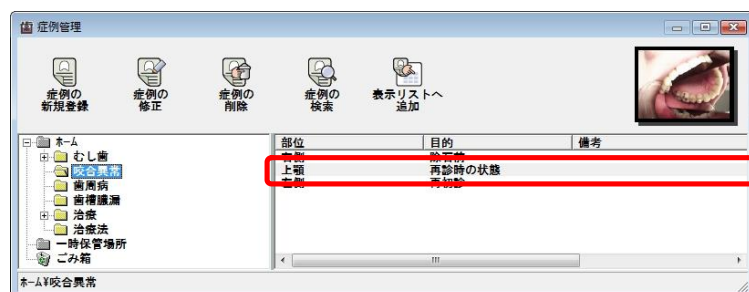

## 1.12 症例を表示リストに追加

### 1


画像表示画面が表示されている状態にします。





## 2

症例管理画面を表示し、画像を選択した後、「表示リストへ追加」アイコンを押してください。

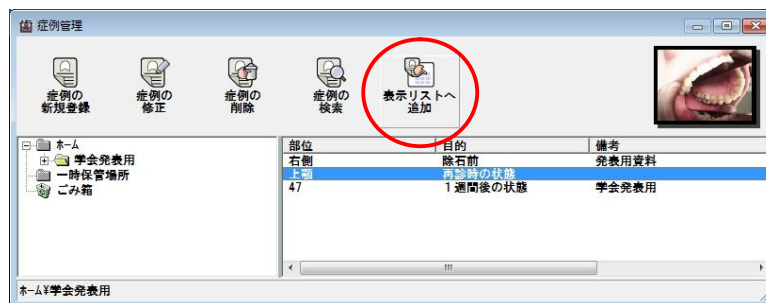

## 3

画像表示画面の表示リストに追加されました。

