



オペレーションマニュアル
バックアップ 編

目次

はじめに.....	1
1. データのバックアップ.....	2

はじめに

本マニュアルは、歯撮くんplusの「バックアップ機能」に関するオペレーションの説明です。

☆わかりにくい用語の解説☆

- クリック: マウスの左クリックのマウスの右ボタンを1回押してすぐに離す操作。
- 右クリック: マウスの右ボタンを1回押してすぐに離す操作。
- 左クリック: マウスの左ボタンを1回押してすぐに離す操作。
- ダブルクリック: マウスの左ボタンを素早く押して離し(クリック)、間を空けずにその場所で同じ動作をもう1回繰り返す操作。
- ドラッグ: マウスの左ボタンで選択したまま、マウスを動かす操作。
- ドロップ: 移動先でマウスボタンを離す操作。
- サムネイル画像: 多数の画像を一覧表示するために縮小された画像。本来は「親指(thumb)の爪(nail)」という意味。

1. データのバックアップ

データベースおよび画像ファイルは、定期的にバックアップを行う必要があります。

ここでは、「歯撮くんバックアップ」による手順とその機能について説明いたします。

※尚、画像ファイルを取り扱うため、容量の大きい外部メディア(外付けハードディスクなど)へのバックアップをお勧めいたします。


以下では、外付けハードディスクにバックアップを行う方法を説明いたします。

1

用意した外付けハードディスクをPCに接続してください。

2

デスクトップにある「歯撮くんバックアップ」アイコンをダブルクリックするか、または「歯撮くんバックアップ」アイコンの上でマウスを右クリックして「開く(O)」を選択します。

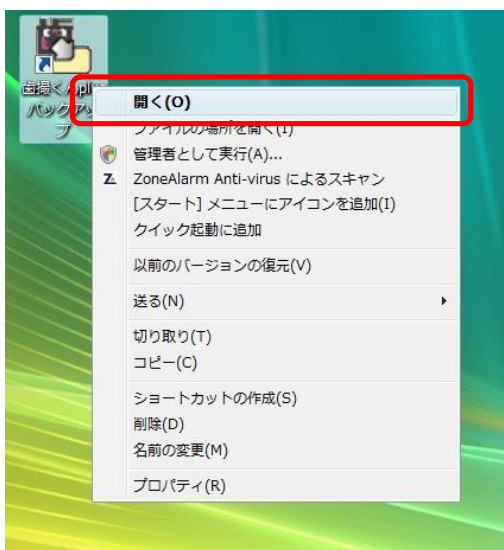


3

「バックアップ先フォルダ」を指定します。


[参照]ボタンを押してください。

※尚、ここで指定したディレクトリへ歯撮くんのすべてのデータがバックアップされますので、残容量が十分にある場所へのバックアップをお勧めいたします。

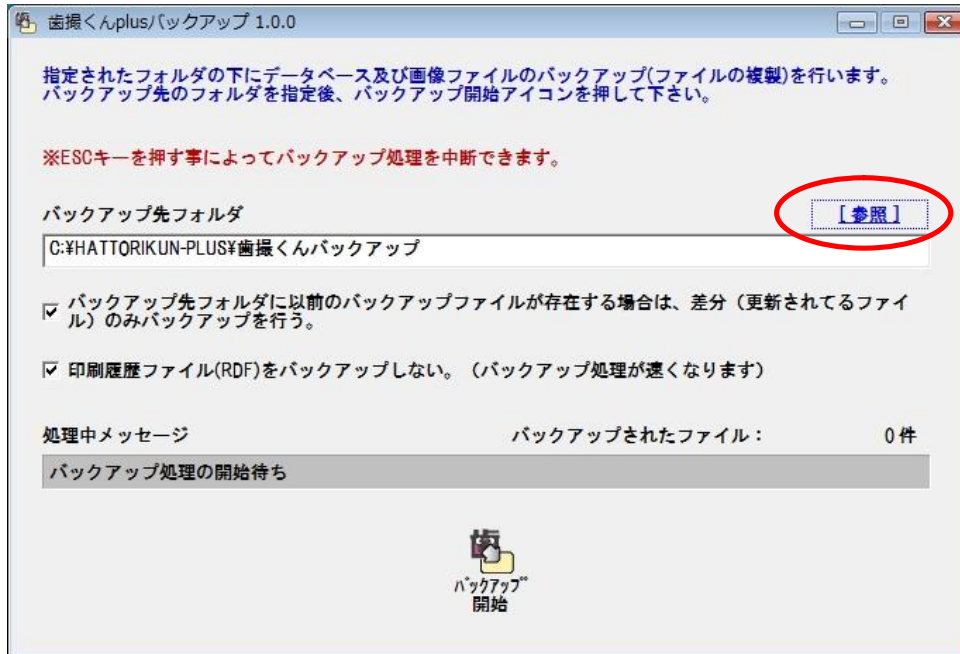

4

接続した外付けハードディスク(ここでは、「HD-PFU2(G:)」)を選択して、「OK」ボタンを押してください。
※外付けハードディスクの種類によって表示名が異なります。ご注意ください。

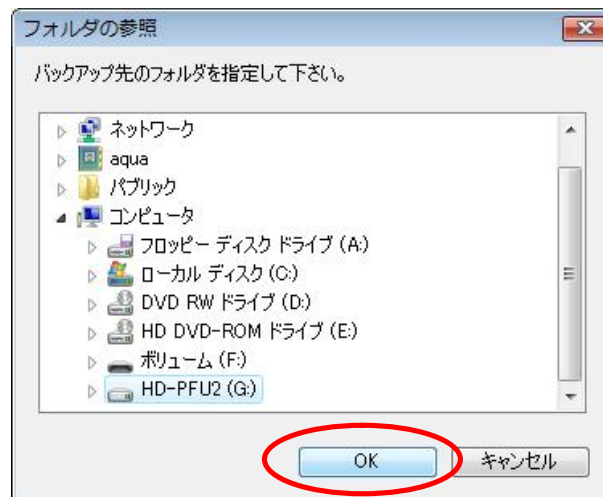

5


「バックアップ開始」アイコンを押すとバックアップが開始されます。

※バックアップ速度を速くしたい場合は、「印刷履歴ファイルのバックアップを行わない」のチェックボックスをオンにしてください。



6

バックアップ完了した旨の画面が出ますので、「OK」ボタンを押してください。

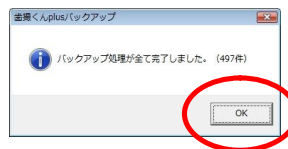

7


バックアップデータが作成されていることを確認します。

[スタート]—[コンピュータ]を押してください。




8

接続した外付けハードディスクをダブルクリックしてください。

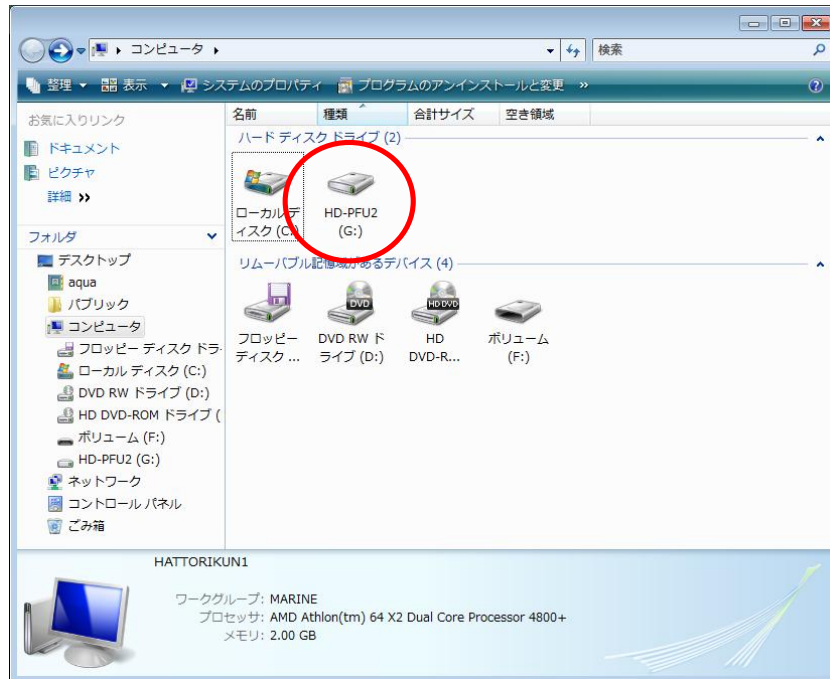

9

バックアップデータが作成されていることを確認してください。

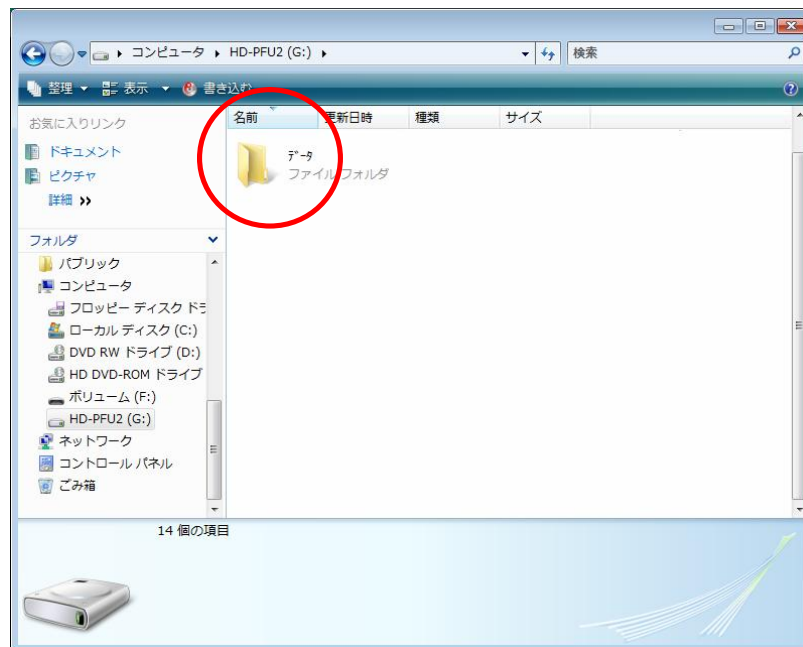

以上で、バックアップ作業は完了です。